

CINORCROS PÓ



INDICAÇÃO

Desincrustante que efetua a remoção de incrustações orgânicas e inorgânicas de materiais e instrumentos médicos, odontológicos e laboratoriais.

MODO DE USAR

Para cada litro de água adicionar uma colher de chá de CINORCROS PÓ. Agitar para uma melhor homogeneização. Imergir os materiais completamente nesta solução e deixar agir por aproximadamente 15 minutos. Retirar os instrumentos da solução com auxílio de uma pinça. Lavar com água deionizada abundantemente e deixar secar antes de ser esterilizado. Artigos de borracha ou alumínio não devem permanecer por mais de 15 minutos na solução.

COMPOSIÇÃO

Fosfato Trissódico 12 H₂O, Carbonato de Sódio, Lauril Sulfato de Sódio e Edta Tetrassódico

APRESENTAÇÕES

Embalagem de 1 Kg.

REGISTRO MS nº: 3.3301.0009



PRAZO DE VALIDADE

24 meses a partir da data de fabricação.

SOLICITE ORÇAMENTO



toque no botão para interagir



TELEFONE: 16 99155-6015



Fortunato Celegato, 401
Jr. Paranoa - Serrana/SP



www.cinord.com.br
vendas1@cinord.com.br

